


ENDORACTOR[®]

ESPONJA ENDOSCÓPICA PARA LA RETRACCIÓN DE TEJIDOS

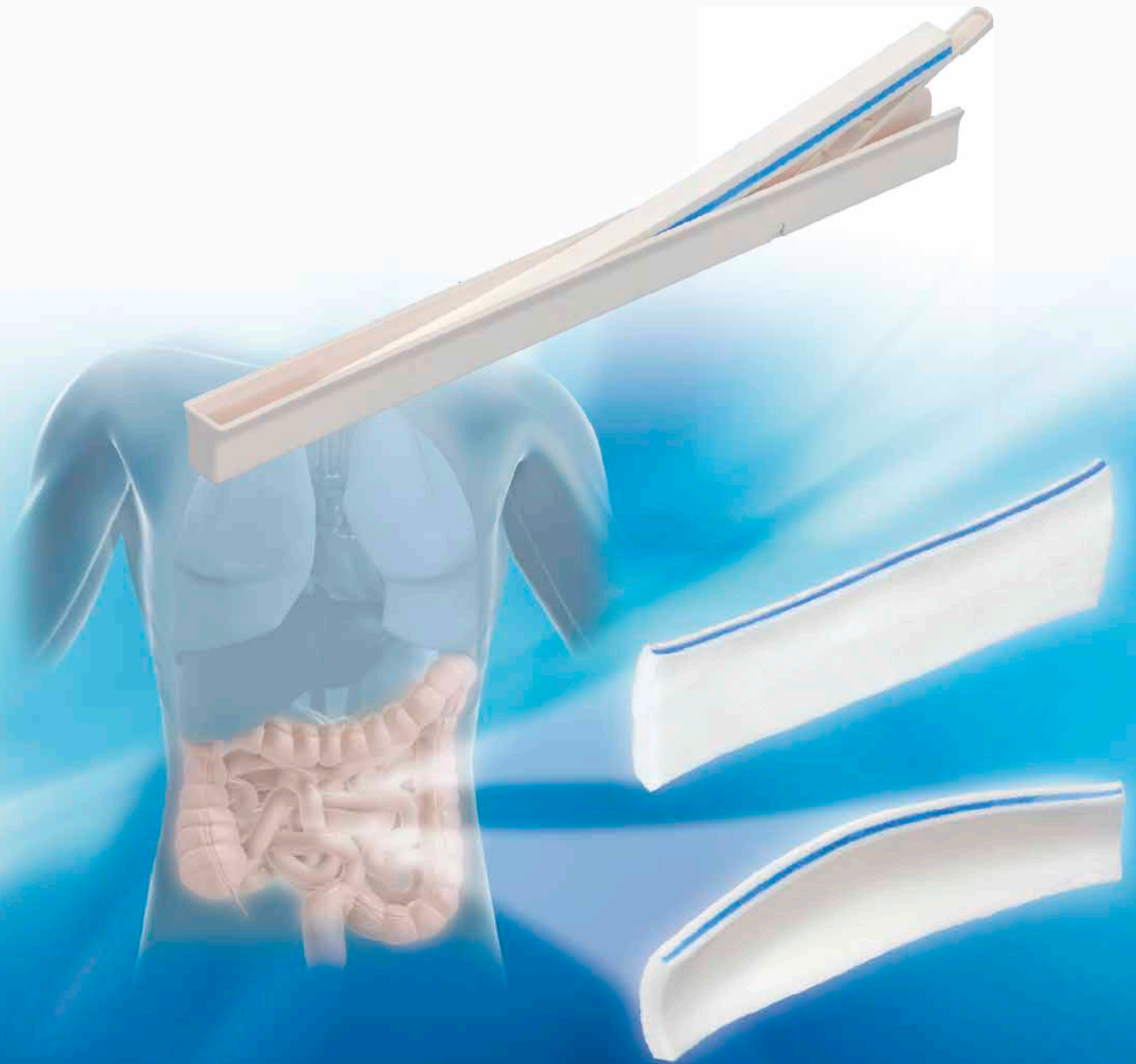

BIOSER[®]

ENDORACTOR®

ESPONJA ENDOSCÓPICA PARA LA RETRACCIÓN DE TEJIDOS

Endoractor® es una esponja de uso en Cirugía Mínimamente Invasiva para la retracción de las asas intestinales. Se empapa con suero y aumenta su volumen creando una barrera para retraer tejidos y colaborar en la calidad y espacio del campo quirúrgico.



- Elimina la necesidad de posicionar al paciente cabeza-abajo para la separación de órganos en cirugía.
- Endoractor® permite llevar a cabo el procedimiento quirúrgico con el paciente en posición horizontal.
- Menor traumatismo a los tejidos gracias a su composición de celulosa que reduce el riesgo de daños y protege los órganos internos en comparación con otros retractores del mercado.
- Reduce el estrés del cirujano y asegura un buen campo operatorio al poder trabajar con el paciente en posición semi-horizontal y evitar el descenso de órganos derivado de posiciones Trendelenburg extremas.

“Un nuevo concepto para separar órganos en Cirugía Mínimamente Invasiva”




- Identificable por rayos-X.
- Reduce el riesgo de residuos internos.
- La barrera de celulosa permite una retracción amplia y segura de órganos que puedan obstruir el campo visual de trabajo en quirófano.
- La esponja endoscópica Endoractor® se infla y aumenta aproximadamente 9 veces su tamaño inicial.
- Evita el uso de retractores de órganos en cirugía (Colorectal, Urológica, Ginecológica)
- Preformado con una parte central más ancha y diseño en curvatura para permitir la exclusión efectiva de las asas intestinales (tipo J: 20cm – tipo JL).

Fabricado en Japón por:



Procedimiento de uso

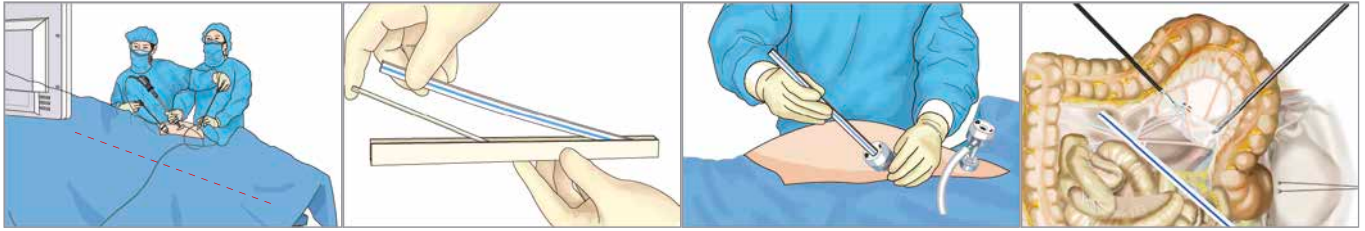


1. Coloque al paciente cabeza-abajo o en otra posición que asegure la exclusión de órganos del campo de trabajo.

2. Saque Endoractor® de su caja.

3. Inserte Endoractor® a través de un trócar con diámetro no menor a 12 mm.

4. Coloque Endoractor® en el lugar adecuado.

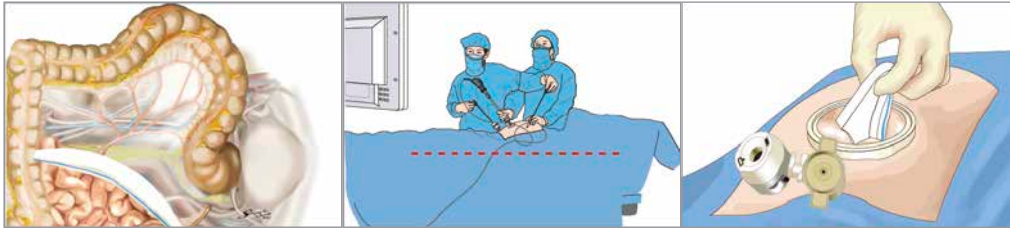

5. Empape Endoractor® con suero salino/fisiológico para inflarlo y separe los órganos no necesarios en la cirugía para asegurar el campo quirúrgico.

6. Vuelva a colocar al paciente en posición cuasi-horizontal y proceda con la cirugía.

7. Aproveche la incisión efectuada para la introducción del trócar, o agrándela ligeramente para retirar Endoractor® de la cavidad abdominal.

Descripción

	ENDORACTOR 24 cm	ENDORACTOR TIPO J 20 cm	ENDORACTOR TIPO JL
PREVIO INFLADO			
	240 x 8 x 8 mm	200 x 8 x 8 mm	240 x 8 x 8 mm
DESPUÉS DEL INFLADO			
	260 x 72 x 8 mm	210 x 60/40 x 8 mm	260 x 60/80 x 8 mm
ABSORCIÓN APROXIMADA	150 ml	80 ml	150 ml

Referencias	Descripción	Tipo	U/Caja
088-480000	ENDORACTOR®	24 cm	6
088-480010	ENDORACTOR®	J 20 cm	6
088-480500	ENDORACTOR®	JL	6



OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
33203 Gijón, Asturias, España
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452
info@mba.eu

BIOSER®

DISTRIBUCIÓN España

ÁREA CENTRO NOROESTE

DELEGACIÓN ASTURIAS

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
33203 Gijón (Asturias), España
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452

DELEGACIÓN CANARIAS

León y Castillo 42, 5º B.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T: +34 928 431 176 F: +34 928 380 060

DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN

Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid
T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646

DELEGACIÓN GALICIA

Gran Vía 161, 1º C, 36210 Vigo
T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804

DELEGACIÓN MADRID

Calle Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid
T: +34 91 434 05 30 F: +34 91 433 76 99

ÁREA LEVANTE

DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA

Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real
T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552

DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

Alberique 27, Esc. Izq. 1º, Puerta 3, 46008 Valencia
T: +34 96 382 66 02 F: +34 963 859 856

ÁREA NORESTE

DELEGACIÓN ARAGÓN

Avd. Las Torres 24, Planta 1º, Oficinas 3 y 4
50008 Zaragoza
T: +34 976 461 092 F: +34 976 461 093

DELEGACIÓN BALEARES

Carles Riba 1. 07004 Palma de Mallorca
T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601

DELEGACIÓN CATALUÑA

Sardenya 48-52, bajos, local 5. 08005 Barcelona
T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

DELEGACIÓN NAVARRA

San Raimundo 9, bajo. 31009 Pamplona
T: +34 948 198 535 F: +34 948 177 416

DELEGACIÓN PAÍS VASCO Y CANTABRIA

Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao
T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 382

ÁREA SUR

DELEGACIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Avd. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

DELEGACIÓN ANDALUCÍA ORIENTAL

Juan Gris 16, 29006 Málaga
T: +34 952 040 300 F: +34 952 316 016

DELEGACIÓN EXTREMADURA

Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

DISTRIBUCIÓN Portugal

DELEGACIÓN PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2ºA, 4100 320 Porto
T: +351 226 166 060 F: +351 226 166 069

