

# TUBO LARÍNGEO PARA INTUBACIÓN iLTS-D

Dispositivo Supraglótico de 3ª generación



**BIOSER®**

# TUBO LARÍNGEO PARA INTUBACIÓN iLTS-D

Dispositivo Supraglótico de 3ª generación



Se estima que hasta un 20% de las intubaciones en emergencia son difíciles. Por eso, tener disponible un dispositivo adecuado y efectivo es la piedra angular en el manejo de la vía aérea en emergencia. Los algoritmos recomiendan el uso de dispositivos extraglotticos (DEG) como alternativa ante una vía aérea difícil.

Con el fin de evitar la aspiración, el informe de NAP4 prescribe el uso de dispositivos con acceso gástrico.

Los dispositivos extraglotticos con posibilidad de intubación proporcionan una manera definitiva de acceder a la vía aérea.

El dispositivo de 3ª generación iLTS D recopila todas las características esenciales para lograr y proteger la vía aérea:

**Ventilación:** Amplia sección de vía aérea para optimizar el flujo de gas y manguito de baja presión para maximizar el rendimiento del sellado.

**Tubo de drenaje:** Acceso gástrico que permite el paso de una gran sonda de aspiración.

**Intubación:** Lumen de ventilación con un diseño especial que permite la inserción de un TET a través de un fibrobroncoscopio.

## Características



### Tamaños eficientes

El iLTS D es una solución ideal para ahorrar espacio en las bolsas de emergencia y carros de parada.

Sólo dos tamaños para todos los pacientes  $\geq 125$ cm

Tamaño 2.5/3: 125 - 155cm

Tamaño 4/5:  $\geq 155$ cm



### Ventilación

El diseño de la sección de ventilación optimiza el flujo de gas y evita la oclusión de la epiglotis.

La pared delgada del manguito garantiza una máxima presión de fuga en la vía aérea con baja presión del manguito (< 60 cmH<sub>2</sub>O).



### Tubo de drenaje

El tubo de drenaje permite el paso de una gran sonda de aspiración:

Tamaño 2.5/3 max. 16Fr

Tamaño 4/5 max. 18Fr



### Intubación

El iLTS-D asegura la vía aérea en anestesia y permite, a través del fibrobronoscopio, la colocación de un TET sin comprometer la ventilación supraglótica.

Tamaño 2.5/3 TET max. I.D. 6.5 mm

Tamaño 4/5 TET max. I.D. 8.0 mm

## Información de pedido



### Tubo laríngeo para intubación iLTS-D estéril, un sólo uso

Tamaño	Paciente	Set unitario 1x iLTS-D 1x Jeringa	Set de 10 10x iLTS-D	Set de intubación 1x iLTS-D 1x TET con estabilizador 1x Jeringa
2.5/3	125-155 cm	<b>REF 32-08-123-1</b>	<b>REF 32-08-023-1</b>	<b>REF 32-08-309-1</b>
4/5	≥ 155 cm	<b>REF 32-08-145-1</b>	<b>REF 32-08-045-1</b>	<b>REF 32-08-209-1</b>

### Tubo con estabilizador estéril de un sólo uso

Tamaño	Tamaño del iLTS-D	REF	Caja
I.D. 5.5 mm	2.5/3	<b>31-40-055-1</b>	10
I.D. 7.5 mm	4/5	<b>31-40-075-1</b>	10



Fabricado por:

## OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra  
33203 Gijón, Asturias, España  
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452  
info@mba.eu

# BIOSER<sup>®</sup>

## DISTRIBUCIÓN España

### ÁREA CENTRO NOROESTE

#### DELEGACIÓN ASTURIAS

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra  
33203 Gijón (Asturias), España  
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452

#### DELEGACIÓN CANARIAS

León y Castillo 42, 5º B.  
35003 Las Palmas de Gran Canaria  
T: +34 928 431 176 F: +34 928 380 060

#### DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN

Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid  
T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646

#### DELEGACIÓN GALICIA

Gran Vía 161, 1º C, 36210 Vigo  
T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804

#### DELEGACIÓN MADRID

Calle Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid  
T: +34 91 434 05 30 F: +34 91 433 76 99

### ÁREA LEVANTE

#### DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA

Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real  
T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552

#### DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

Alberique 27, Esc. Izq. 1º, Puerta 3, 46008 Valencia  
T: +34 96 382 66 02 F: +34 963 859 856

### ÁREA NORESTE

#### DELEGACIÓN ARAGÓN

Avd. Las Torres 24, Planta 1º, Oficinas 3 y 4  
50008 Zaragoza  
T: +34 976 461 092 F: +34 976 461 093

#### DELEGACIÓN BALEARES

Carles Riba 1. 07004 Palma de Mallorca  
T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601

#### DELEGACIÓN CATALUÑA

Sardenya 48-52, bajos, local 5. 08005 Barcelona  
T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

#### DELEGACIÓN NAVARRA

San Raimundo 9, bajo. 31009 Pamplona  
T: +34 948 198 535 F: +34 948 177 416

#### DELEGACIÓN PAÍS VASCO Y CANTABRIA

Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao  
T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 382

### ÁREA SUR

#### DELEGACIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Avd. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla  
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

#### DELEGACIÓN ANDALUCÍA ORIENTAL

Juan Gris 16, 29006 Málaga  
T: +34 952 040 300 F: +34 952 316 016

#### DELEGACIÓN EXTREMADURA

Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz  
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

## DISTRIBUCIÓN Portugal

#### DELEGACIÓN PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2ºA, 4100 320 Porto  
T: +351 226 166 060 F: +351 226 166 069