

UNIBLOCKER

Bloqueador bronquial



BIOSER[®]

UNIBLOCKER

Bloqueador bronquial

Uniblocker cuenta con un eje bloqueador flexible de torsión elevada.

Uniblocker se suministra con un conector giratorio exclusivo que incorpora un puerto para fibrobroncoscopio mientras está conectado al circuito de anestesia.


Indicaciones

UNIBLOCKER está diseñado para controlar la vía aérea de pacientes quirúrgicos a través de un tubo endotraqueal con el fin de ventilar un pulmón para bloqueo endobronquial del pulmón izquierdo o derecho en intervenciones de cirugía torácica, resecciones pulmonares, videotorascopias, lobectomías, etc.

Uso general

Introduzca UNIBLOCKER mediante un tubo endotraqueal previamente insertado por la boca o nariz. Sitúe el manguito en la región deseada del pulmón derecho o del izquierdo. Infle el manguito del bloqueador para aislar la zona en cuestión.

Diagrama externo

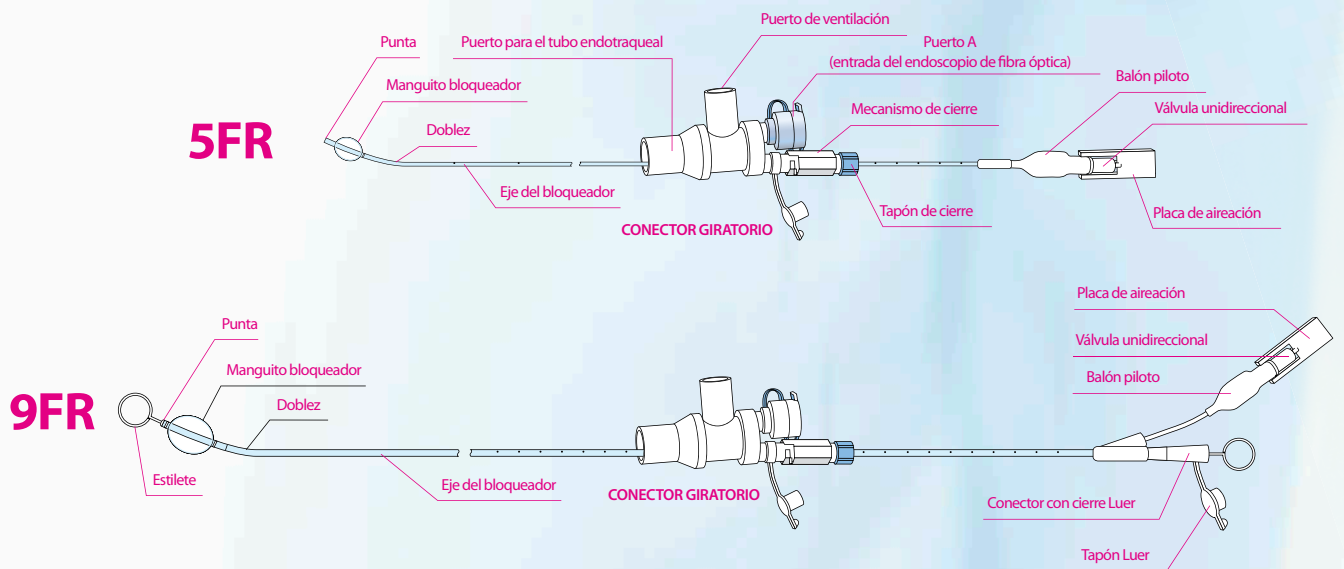

Referencias

Referencia	Tamaño (Ø exterior del eje)	Longitud	Longitud efectiva*1	Longitud manguito	Volumen máximo manguito *2	Volumen neto conector giratorio	Unidad de envasado
1203104	1.7mm (5Fr)	400 mm	300 mm	8 mm	3 mL	20.5 mL	1 uni / caja
1203105	3.0mm (9Fr)	665 mm	510 mm	22 mm	8 mL	20.5 mL	1 uni / caja

*1 La longitud efectiva es la distancia más larga medida desde la punta hasta la unión del tubo endotraqueal con el conector giratorio.

*2 Los volúmenes máximos del manguito no se corresponden con el volumen exacto de inyección.

Fácil extracción

El bloqueador se extrae fácilmente sin desmontar el conector giratorio del circuito de anestesia. Basta con desinflar del manguito y retirar el conector de apertura rápida.





Conector giratorio

En caso de que se tenga que mover al paciente, el conector móvil giratorio permite girar el circuito. Facilita la inserción del fibrobronscopio



Bloqueador del control de torsión

Su eje con BCT incorpora una malla metálica que permite controlar la torsión. La malla es radiopaca.

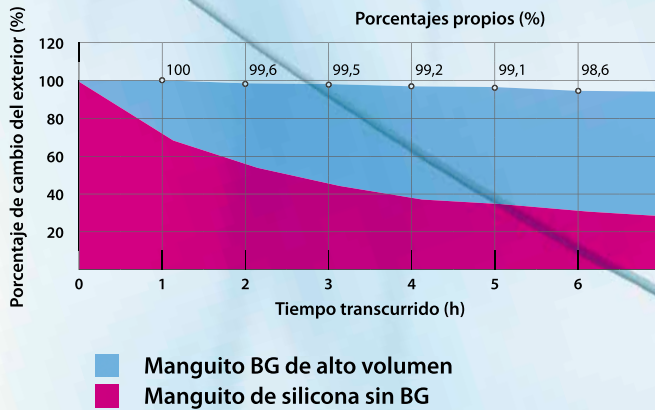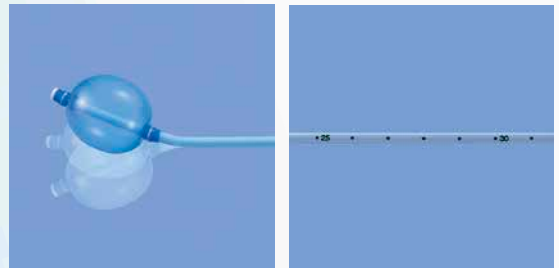

Perfil del manguito

Manguito de BG (barrera de gas) de alto volumen Solo para UNIBLOCKER de 9 Fr

Manguito blando de alto volumen hecho de silicona y con propiedades de barrera de gas para reducir la difusión del gas dentro o fuera del manguito (véase el gráfico de arriba).

Fabricado por:



OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
33203 Gijón, Asturias, España
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452
info@mba.eu

BIOSER[®]

DISTRIBUCIÓN España

ÁREA CENTRO NOROESTE

DELEGACIÓN ASTURIAS

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra
33203 Gijón (Asturias), España
T: +34 985 195 505 F: +34 985 373 452

DELEGACIÓN CANARIAS

León y Castillo 42, 5º B.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
T: +34 928 431 176 F: +34 928 380 060

DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN

Democracia 1, bajo. 47011 Valladolid
T: +34 983 320 043 F: +34 983 267 646

DELEGACIÓN GALICIA

Gran Vía 161, 1º C, 36210 Vigo
T: +34 986 484 400 F: +34 986 494 804

DELEGACIÓN MADRID

Calle Cronos 63, 1º, 1. 28037 Madrid
T: +34 91 434 05 30 F: +34 91 433 76 99

ÁREA LEVANTE

DELEGACIÓN CASTILLA LA MANCHA

Santa Bárbara, Local 2-4. 13003 Ciudad Real
T: +34 926 274 820 F: +34 926 230 552

DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

Alberique 27, Esc. Izq. 1º, Puerta 3, 46008 Valencia
T: +34 96 382 66 02 F: +34 963 859 856

ÁREA NORESTE

DELEGACIÓN ARAGÓN

Avd. Las Torres 24, Planta 1º, Oficinas 3 y 4
50008 Zaragoza
T: +34 976 461 092 F: +34 976 461 093

DELEGACIÓN BALEARES

Carles Riba 1. 07004 Palma de Mallorca
T: +34 971 292 561 F: +34 971 298 601

DELEGACIÓN CATALUÑA

Sardenya 48-52, bajos, local 5. 08005 Barcelona
T: +34 93 224 70 25 F: +34 93 221 31 37

DELEGACIÓN NAVARRA

San Raimundo 9, bajo. 31009 Pamplona
T: +34 948 198 535 F: +34 948 177 416

DELEGACIÓN PAÍS VASCO Y CANTABRIA

Músico Sarasate 2-4, bajo. 48014 Bilbao
T: +34 944 396 432 F: +34 944 271 382

ÁREA SUR

DELEGACIÓN ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Avd. Reino Unido 7, local 2. 41012 Sevilla
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

DELEGACIÓN ANDALUCÍA ORIENTAL

Juan Gris 16, 29006 Málaga
T: +34 952 040 300 F: +34 952 316 016

DELEGACIÓN EXTREMADURA

Francisco Guerra 14. 06011 Badajoz
T: +34 954 934 792 F: +34 954 783 820

DISTRIBUCIÓN Portugal

DELEGACIÓN PORTUGAL

Rua Manuel Pinto Azevedo 74, 2ºA, 4100 320 Porto
T: +351 226 166 060 F: +351 226 166 069