

KilRoid®

LIGADOR DE HEMORROIDES
POR ASPIRACIÓN DESECHABLE

KilRoid es un ligador de hemorroides por aspiración desechable que siempre estará listo para ser usado. No se necesitan limpiezas ni desinfecciones. El ligador se maneja con una sola mano, el médico puede controlar el ligador y el proctoscopio a la vez sin necesidad de ayuda. Esto quiere decir que KilRoid ahorra tiempo y es coste efectivo (1, 2).


Cuando se requiera una mejor visualización, KilRoid puede ser usado junto con un proctoscopio como una alternativa menos costosa a la ligadura endoscópica (3).

¿Cómo usar KilRoid?


Carga



Antes de proceder a la ligadura, KilRoid debe de ser cargado con una banda de silicona. Esto se consigue fácilmente utilizando el cargador exclusivo.

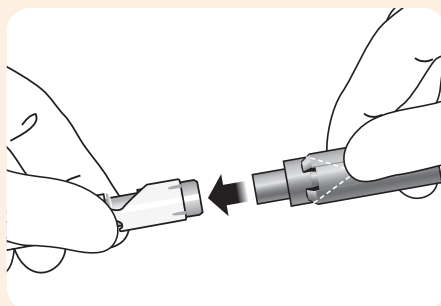


1. Insertar el cono de carga en el extremo de aspiración del ligador KilRoid.
Nota: Asegúrese de que el cono de carga el extremo de aspiración están firmemente unidos y no queda espacio entre ellos.

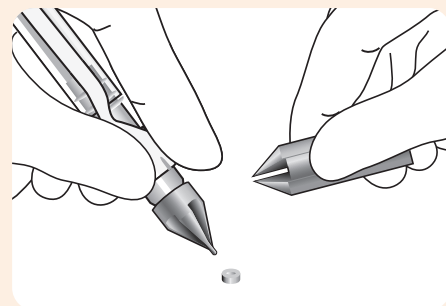


2. Poner una banda en la punta del cono de carga.


Ligadura

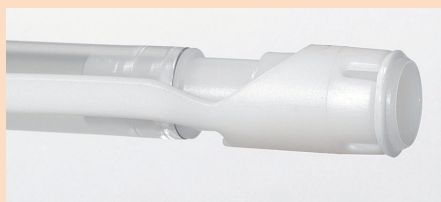

Cuando está cargada la banda, KilRoid está listo para su uso. Debido a que para el manejo del ligador sólo se requiere una mano, el médico podrá tener en una mano el ligador y en la otra el proctoscopio. No se necesita ayuda.

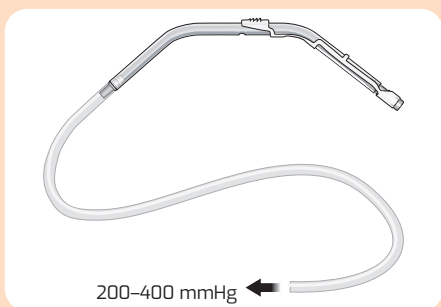


1. Conectar el instrumento ligador KilRoid a la fuente de vacío.

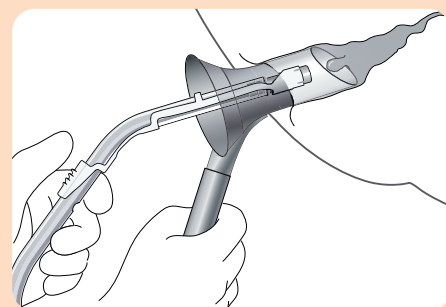


2. Localizar la hemorroide a través de un proctoscopio. KilRoid se introduce por el proctoscopio hasta que la hemorroide queda dentro del lumen del ligador.


- **Cómodo:** Instrumento limpio siempre listo para ser usado
- **Ahorra tiempo:** No se precisan desinfecciones ni limpiezas, se pueden tratar más pacientes
- **Sin necesidad de ayuda:** Manejo con una sola mano
Mejor visibilidad y mayor precisión
- **Higiénico:** Protege al paciente, médico y enfermera de posibles contagios (2) Al ser desechable, se elimina el riesgo de infección cruzada
- **Dispositivo cargador exclusivo:** Facilita la colocación de la banda en el ligador
- **Bandas sin látex:** Eliminan la posibilidad de una reacción alérgica

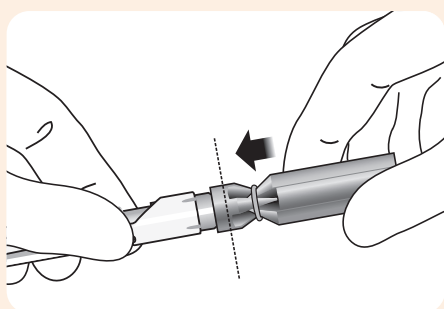


3. Poner el cono expansor en la punta del cono de carga y empujar hasta encajarlo (esto expandirá la banda y la empujará hasta la base del cono de carga).

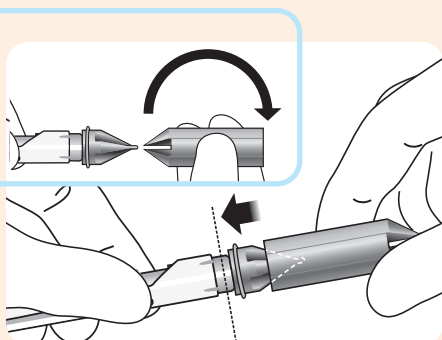


4. Retirar el cono expansor del cono de carga, girar el cono expansor 180°, hasta encajar el extremo abierto del cono expansor con el cono de carga. Empujar la banda de silicona hasta el terminal de aspiración del ligador.

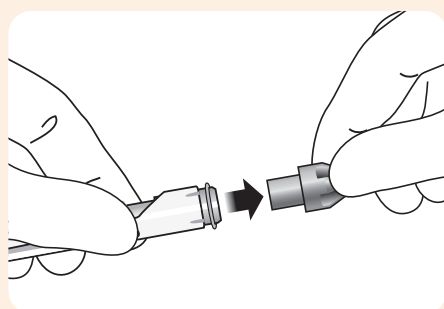


5. Quitar el cono de carga. La banda ahora está en el terminal de aspiración del ligador y éste está listo para ser usado.

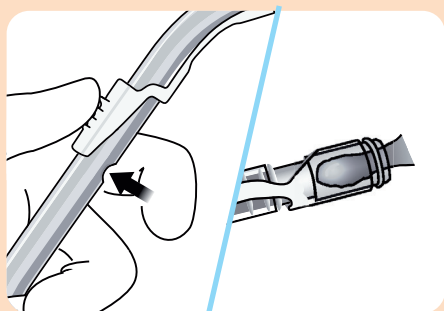

3. Con el control digital de aspiración tapado, se succiona la hemorroide al interior del ligador.

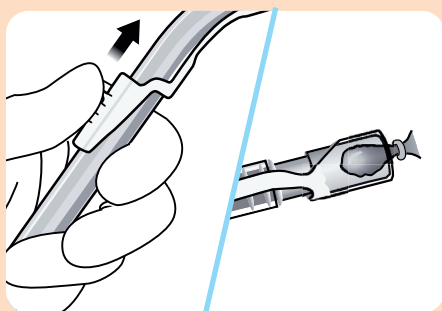


4. El gatillo se acciona presionando con el pulgar. Disparando la banda del ligador, comprimiendo la base de la hemorroide.

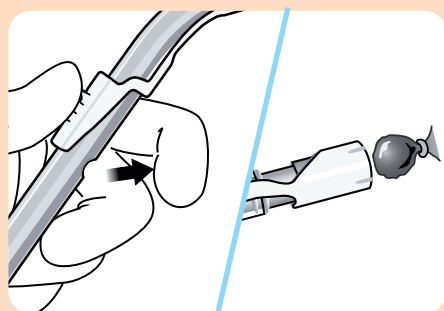

5. El ligador se retira abriendo previamente el orificio de control de aspiración.
Si se han de ligar más hemorroides en un mismo paciente, se pueden cargar una segunda y una tercera banda en el KilROID.

KilRoid®

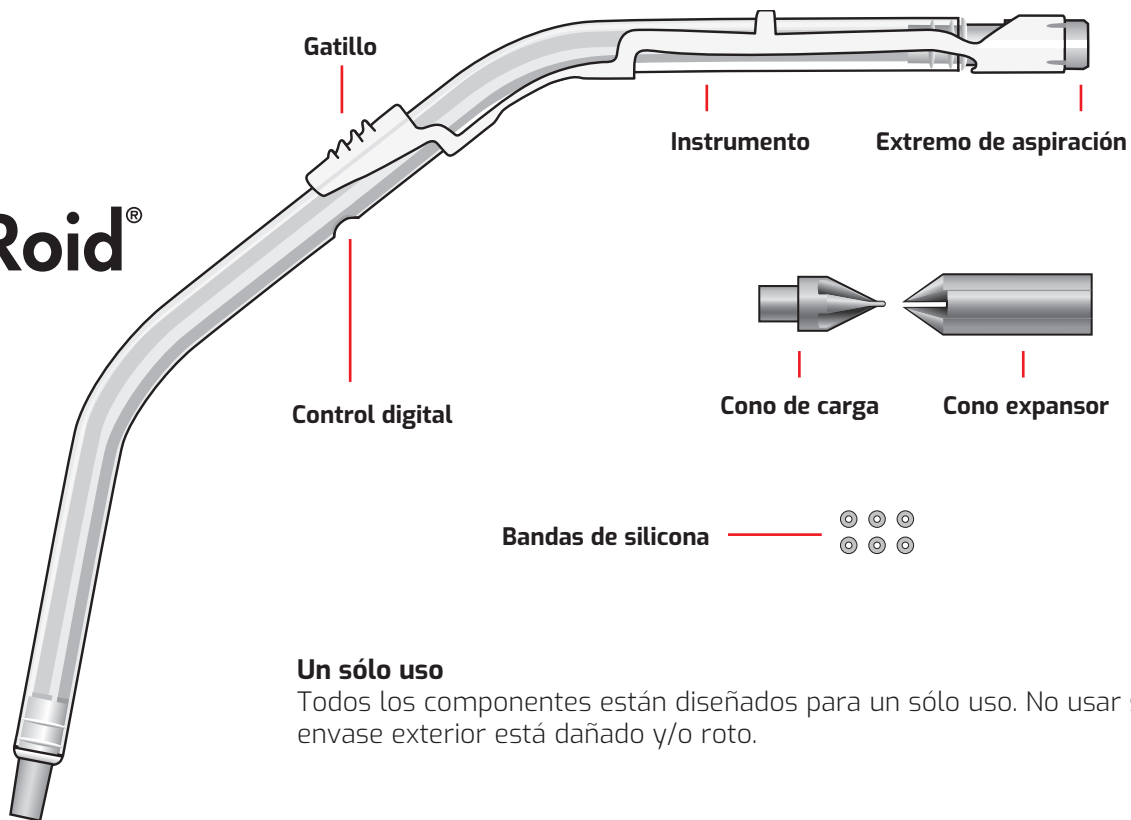

Un sólo uso

Todos los componentes están diseñados para un sólo uso. No usar si el envase exterior está dañado y/o roto.

Descripción

Material

PETG (Instrumento),
PVC (tubuladura),
poliamida (gatillo),
polipropileno (Cono de carga),
ABS (Cono expansor, conector),
silicona (bandas).

Producto – KilRoid™

Ref No

67401 1x30 KilRoid™ con
tubuladura de 2 m.

Referencias:

1. Gallo, G et al.: Techniques in Coloprocto-logy (2020) 24:145–164
2. Salgueiro, P et al.: GE Port J Gastroente-rol 2020;27:90–102
3. Dickey W, Garrett D, Am J Gastroenterol, 2000;95:1714-16.

OFICINAS CENTRALES

Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra.
33203 Gijón, Asturias. Spain.
T: +34 985 195 505. info@mba.eu
www.mba.eu