

UNIBLOCKER

Bloqueador bronquial



UNIBLOCKER

Bloqueador bronquial

Uniblocker cuenta con un eje bloqueador flexible de torsión elevada.

Uniblocker se suministra con un conector giratorio exclusivo que incorpora un puerto para fibrobroncoscopio mientras está conectado al circuito de anestesia.


Indicaciones

UNIBLOCKER está diseñado para controlar la vía aérea de pacientes quirúrgicos a través de un tubo endotraqueal con el fin de ventilar un pulmón para bloqueo endobronquial del pulmón izquierdo o derecho en intervenciones de cirugía torácica, resecciones pulmonares, videotorascopias, lobectomías, etc.

Uso general

Introduzca UNIBLOCKER mediante un tubo endotraqueal previamente insertado por la boca o nariz. Sitúe el manguito en la región deseada del pulmón derecho o del izquierdo. Infle el manguito del bloqueador para aislar la zona en cuestión.

Diagrama externo

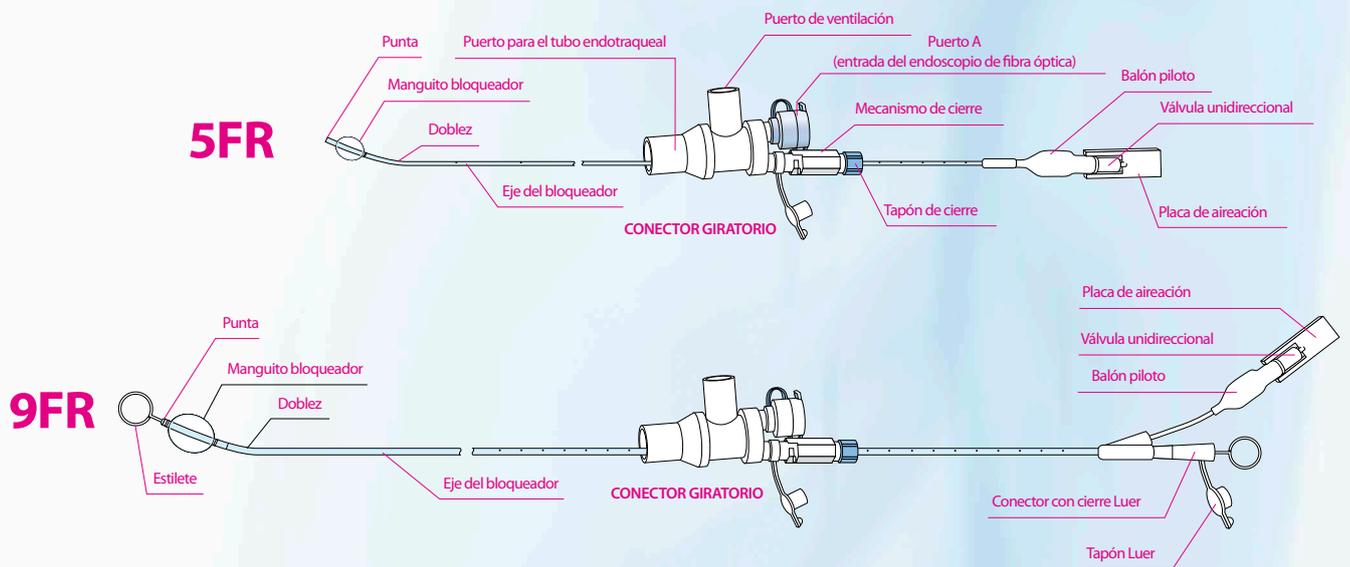

Referencias

Referencia	Tamaño (Ø exterior del eje)	Longitud	Longitud efectiva*1	Longitud manguito	Volumen máximo manguito *2	Volumen neto conector giratorio	Unidad de envasado
1203104	1.7mm (5Fr)	400 mm	300 mm	8 mm	3 mL	20.5 mL	1 uni / caja
1203105	3.0mm (9Fr)	665 mm	510 mm	22 mm	8 mL	20.5 mL	1 uni / caja

*1 La longitud efectiva es la distancia más larga medida desde la punta hasta la unión del tubo endotraqueal con el conector giratorio.

*2 Los volúmenes máximos del manguito no se corresponden con el volumen exacto de inyección.

Fácil extracción

El bloqueador se extrae fácilmente sin desmontar el conector giratorio del circuito de anestesia. Basta con desinflar del manguito y retirar el conector de apertura rápida.





Conector giratorio

En caso de que se tenga que mover al paciente, el conector móvil giratorio permite girar el circuito. Facilita la inserción del fibrobroncoscopio



Bloqueador del control de torsión

Su eje con BCT incorpora una malla metálica que permite controlar la torsión. La malla es radiopaca.

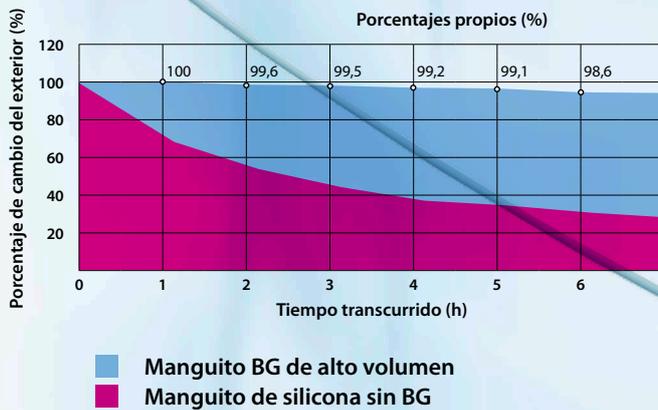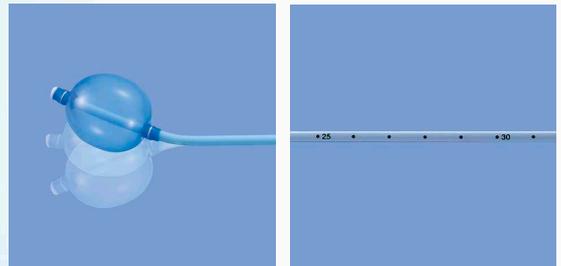

Perfil del manguito



Manguito de BG (barrera de gas) de alto volumen Solo para UNIBLOCKER de 9 Fr

Manguito blando de alto volumen hecho de silicona y con propiedades de barrera de gas para reducir la difusión del gas dentro o fuera del manguito (véase el gráfico de arriba).

Fabricado por:





OFICINAS CENTRALES
Avda. Jardín Botánico 1345, Silos del Intra. 33203 Gijón. España
T: +34 985 195 505 info@mba.eu

www.mba.eu

MBA INCORPORADO, S.L.



MBA.EU

